

CHOISIR UN HARNAIS

pour l'utilisation du lève personne



SANGLE

Mise en place de la sangle : Utiliser une taille de sangle appropriée et vérifier du bon état de celle-ci. La mise en place de la sangle doit se faire, au lit en position allongée à 180° en pratiquant une latéralisation, ou au fauteuil.

CHOIX D'UNE SANGLE en fonction du poids de l'utilisateur et en fonction des capacités de l'utilisateur



Hamac Universel. Avec ou sans tête : Ce harnais convient à la plupart des situations de levage, ce qui en fait un choix idéal lorsque les soignants ne connaissent pas à l'avance le profil du patient à soulever. La conception soutient tout le dos et garde les bras du patient à l'intérieur du harnais. Monté et utilisé correctement, le harnais fournit au patient un sentiment de sécurité et de confort.



Sangle en U. Permet de placer le patient en position assise droite et soutient l'ensemble du dos jusqu'au cou. Si la tête du patient doit être soutenue, il est recommandé d'utiliser un harnais universel. Ce type de harnais facilite l'installation lorsque le patient est installé au fauteuil en raison de sa découpe en forme de U.



Sangle d'hygiène. Le harnais d'hygiène est destiné à faciliter l'habillage et le déshabillage lors du levage depuis/vers les toilettes. Grâce à la large ouverture au niveau du siège, l'habillage et le déshabillage peuvent s'effectuer pendant la procédure de levage elle-même. Pour une sécurité optimale, les bras du patient doivent toujours se trouver à l'extérieur du harnais.

Small
30-50kg

Médium
40-80kg

Large
80/120kg

X Large
+110kg

- L'état de la sangle doit être vérifié à chaque utilisation. En cas de sangle présentant un accroc, une déchirure, une couture abîmée, usure ou défaut **ne pas utiliser la sangle**.
- **Ne pas faire** de nœuds avec les attaches.



**BESOIN D'AIDE ?
CONTACTEZ-NOUS**

fh. Moyens Auxiliaires

Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates

T. 022 794 52 54

